

【製品概要】



医療現場における、使用済み注射針を瞬間で消滅させ、針刺し事故を無くすために生まれた製品です。

ワンショットのセンターにある処理口に注射器を差し込む事で、わずか1秒で注射針を瞬間消滅させます。



【導入先】

注射器を利用する医療現場



① 使用済みの注射器を挿入口にまっすぐ挿入します。



② ゆっくりと(1~3秒)下方に最下点まで押し下げます。



③ Finishedランプの点灯を確認し、ゆっくりと引き上げます。



④ 溶解した針先はダストボックスに集積されます。



注射針が数ミリの長さに溶解され、安全に破棄することができます。



注射針が溶解される事で、シリンダ内が真空化し、プランジャが簡単に抜けなくなる事で、シリンダ内に溜まった血液や体液が流出する事も防ぐ事ができます。